

INICIO

DE LA TRANSFUSIÓN CON HemoCod

SOPORTE

Enfermería de transfusión: 52237 (A)/ 59444 (B) de 8 a 15 horas
Informática C-A.U: Gestión de avisos en intranet sanitaria/28282
Laboratorio de Hemoterapia: 29444/29218




1

SINCRONIZAR
Pulsar el icono de sincro o levantar la PDA. Esperar a que finalice la sincronización

2

Pulsar botón transfusión

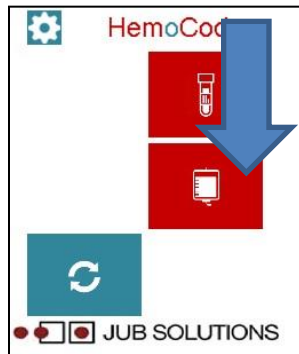

3

Leer código de identificación



4

Escanear los siguientes códigos de bolsa y pulsera:



5

Comprobar identidad del paciente



6

Introducir las constantes vitales tomadas



7

Confirmar inicio



3

PULSERA




CIERRE DE LA TRANSFUSIÓN CON HemoCod

SOPORTE

Enfermería de transfusión: 52237 (A)/ 59444 (B) de 8 a 15 horas
 Informática C-A.U: Gestión de avisos en intranet sanitaria/28282
 Laboratorio de Hemoterapia: 29444/29218

1 Pulsar botón transfusión

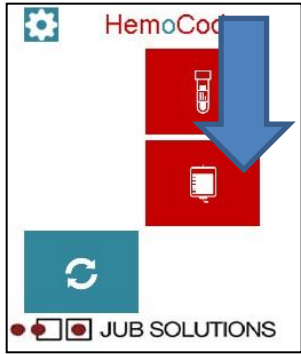

2 Leer código de identificación



3 Escanear los siguientes códigos de bolsa y pulsera:



4 Si hubo reacción o se interrumpió la transfusión, indicar Reacción y/o Incompleta




Si se indica **Incompleta**, se pueden introducir observaciones y el volumen transfundido

Si se indica **Reacción**, se deben marcar los síntomas que aparecen listados en las pantallas posteriores.

5 Introducir constantes vitales y confirmar



6 Conectar de nuevo la PDA a la base de sincronización y recoger el informe transfusional.

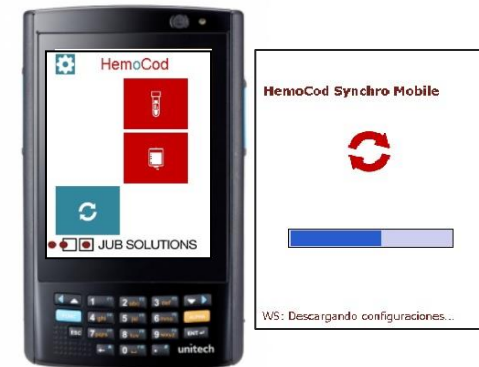

EXTRACCIÓN


DE LA MUESTRA CON HemoCod

SOPORTE

Enfermería de transfusión: 52237 (A)/ 59444 (B) de 8 a 15 horas
Informática C-A.U: Gestión de avisos en intranet sanitaria/28282
Laboratorio de Hemoterapia: 29444/29218

1

Pulsar botón de extracciones

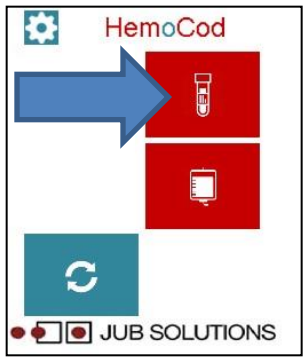

2

Leer código de identificación




3

Identificar al paciente con el NHC



4

Leer el código de la pulsera

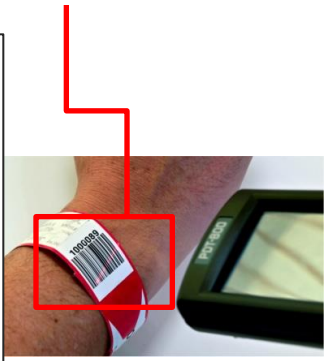


5

Leer el código del tubo de la muestra



6

Leer el código de las etiquetas adicionales

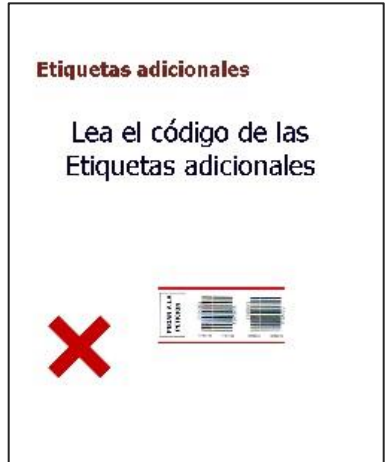


7

Introducir el servicio de la extracción



8

Conectar de nuevo la PDA a la base de sincronización

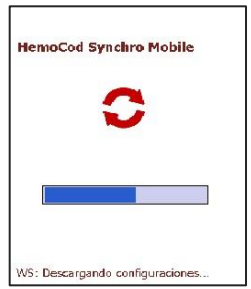


GUÍA RÁPIDA DE USO PDA

SOPORTE

Enfermería de transfusión: 52237 (A)/ 59444 (B) de 8 a 15 horas
Informática C-A.U: Gestión de avisos en intranet sanitaria/28282
Laboratorio de Hemoterapia: 29444/29218

1

Teclado virtual: para mostrar o esconder el teclado, usar el icono de teclado cuando sea necesario. Se puede usar el asterisco para cambiar el tipo de caracteres, mayúsculas o signos. El teclado virtual se puede combinar con el uso del teclado físico sin ningún tipo de problema.

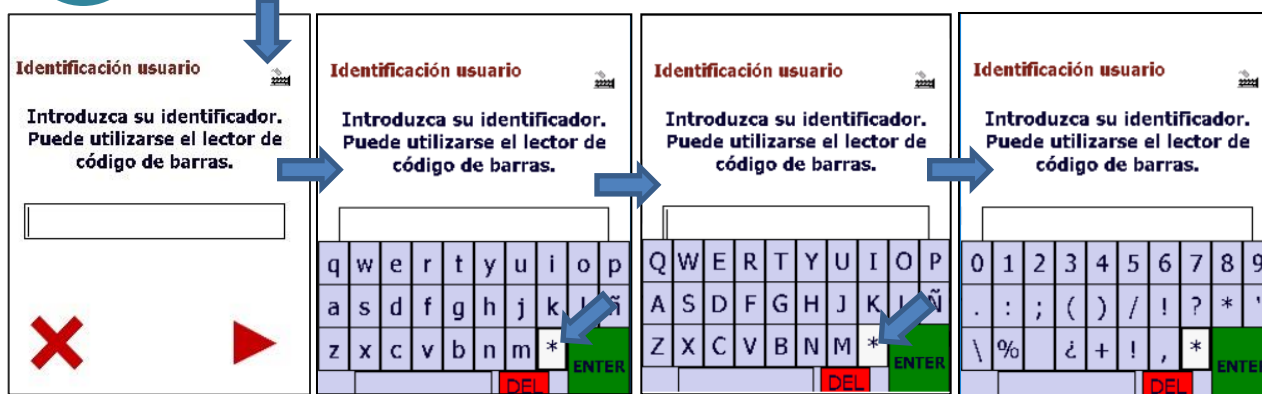

Para el borrado de caracteres podremos usar la tecla roja "DEL" o bien la flecha de borrado del teclado físico (1). Para la confirmación podemos usar la tecla verde "ENTER" o bien la tecla ENT del teclado físico (2).

2

Para activar el **escáner** hacer uso de los botones laterales. Mantener una distancia media entre la PDA y el código de barras. Muy cerca nos costará leer el código, mientras que muy lejos podemos leer otros códigos no deseados.



3

Cuando no usemos la PDA se deberá dejar en su **base** asegurando que quede bien encajada. Lo sabremos si vemos que aparece una luz en la parte superior de la PDA. A los pocos segundos empezará una **sincronización** automática.



4



Si la PDA presenta malfuncionamientos o bloqueo podemos tratar de solventarlo con un **reinicio**. Para forzar un reinicio podemos pulsar el botón RESET de la parte trasera con un boli o un clip, o bien usar la pestaña para sacar y poner nuevamente la batería. En 1 minuto aproximadamente volveremos a ver la pantalla principal de HemoCod.

Lo mismo sucederá si la PDA se queda sin batería y la conectemos de nuevo. En este caso el proceso durará unos 5 minutos, hasta ver la pantalla principal de HemoCod.

